

成品尺寸 125*190mm



牙科用氢氟酸酸蚀剂产品说明书
HF Etching Gel

牙科用氢氟酸酸蚀剂为绿色凝胶状膏体，氢氟酸含量9.5%。用于烤瓷材料的酸蚀处理。本酸蚀剂可有效地去除表面污垢，增大表面积，提高粘接强度。

【产品名称】牙科用氢氟酸酸蚀剂

【规格】1.2ml/支、2.5ml/支、5.0ml/支

【性能】外观：具有明显的颜色，质地均匀，无杂质。
热稳定性：(50±1)℃条件下24h,无颜色变化、分层、外溢现象。
含量：氢氟酸含量9.5%。

【主要成分】9.5%氢氟酸、黄原胶、水、颜料。

【适用范围】用于烤瓷材料的酸蚀处理。

- 【操作步骤】1.除去烤瓷表面污垢后，将制备好的粘接面洗净，吹干。
2.将酸蚀剂涂于粘接面，酸蚀60-90秒。（用于口腔内烤瓷牙修补时，应使用保护障保护）
3.酸蚀完成后用清水冲洗，并及时吸出冲洗液。在酸蚀过程中，吸管一直放在酸蚀面上方，以便吸走氢氟酸蒸汽。
4.施用牙科用瓷修复预处理剂。（按其说明书操作）
5.然后使用牙科粘接剂和树脂进行粘接和修补。

- 【注意事项】1.本酸蚀剂具有腐蚀性，勿使其接触眼睛、皮肤及粘膜。如果不慎接触，应立即用大量清水清洗，严重者应就医。
2.口腔黏膜有溃疡者请慎用。
3.过敏体质者应慎用。
4.氢氟酸具有毒性，仅供专业技术人员使用。
5.其它危害未曾验证尚不明确。

【警示及提示内容】仅用于烤瓷材料的酸蚀处理。

【产品维护和保养方法】用完后及时拧紧注射器帽。

【贮藏】常温

【生产日期、生产批号、失效日期】见产品外包装。

【使用期限】二年

【许可证编号】吉食药监械生产许20160013号

【注册证编号】吉械注准20212170522

【技术要求编号】吉械注准20212170522



【医疗器械标签所用的图形、符号、缩写等内容的解释】

序号	图标	解释
1		怕晒
2		怕雨
3		生产日期
4		有效期
5		产品批号
6		包装破损请勿使用

【注册人/生产企业/售后服务单位】

吉林省登泰克牙科材料有限公司

【住所/生产地址】

长春市高新区成功路721号

联系方式:400-6699-820

售后服务电话:400-6699-820

传 真:0431-87855157

邮 编:130103

网 址:www.dentexmd.com

【修订日期】2021年12月1日